
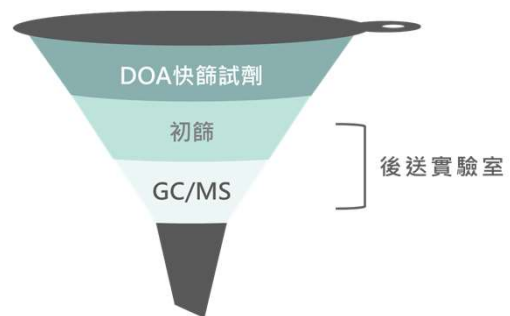


藥物濫用檢測試劑 五合一快速檢驗試劑

聯準生技國際有限公司
04-23266366
Line ID: 0977689806

試劑使用流程

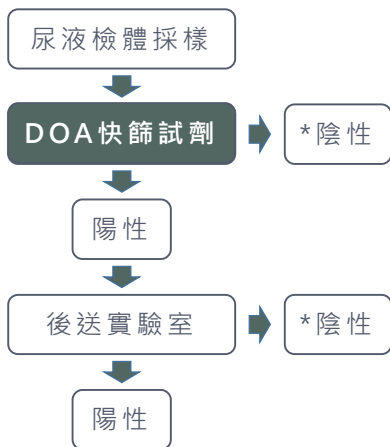

*陰性：無毒品反應 / 毒品濃度低於閾值



五合一試劑簡介

- 利用**免疫定性分析方法**，初步篩檢樣本中是否含有違禁藥物，以肉眼判讀結果。本測試匣可由一般人員依需求**選定測試毒品項目**。
- 可檢測項目與閾值

檢測項目	英文縮寫	閾值 (ng/mL)
大麻	THC	50
甲基安非他命	MET/MDMA	500
愷他命	KET	100
苯二氮洋類	BZD (BZO)	300
辣大麻	K2	50


3



試劑組原理

- **競爭型**免疫定性分析方法

檢體中的毒品與試劑T線上的物質共同**競爭**膠體金上抗體結合位置。

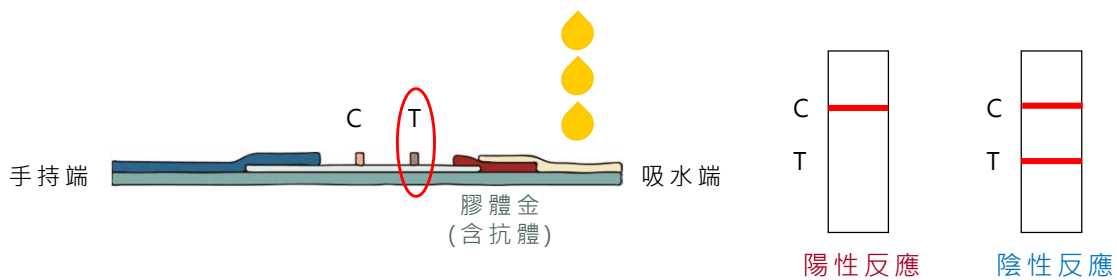

4




儲存及操作環境-室溫

Legend

A reliable, leading and professional company

Legend is a registered trademark of Legend Diagnostics Ltd.

- 試劑存放
- 實際操作
- 使用檢體

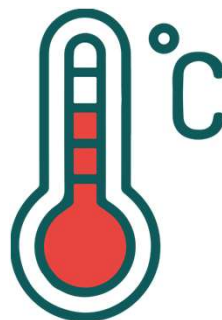

若取得尿液當下無法立即檢測，建議存放於2-8℃，
若存放超過48小時，需重新採集檢體進行檢測。

5



注意事項

Legend

A reliable, leading and professional company

Legend is a registered trademark of Legend Diagnostics Ltd.

- 檢測結果僅作為**初步篩檢**之用，若懷疑有藥物濫用情形，建議可至衛生福利部認可之濫用藥物尿液檢驗機構進行確認檢驗
- 有效期限 **EXP**
- 避免曝曬於陽光下
- 鋁箔包開封後應立即使用
- 本試劑不可重複使用



6



自備器材

Legend

A reliable, leading and professional company
 可靠、領先和專業的醫療器械公司



7



試劑操作步驟 (一)

Legend

A reliable, leading and professional company
 可靠、領先和專業的醫療器械公司

檢查鋁箔袋包裝是否完整，是否過期。

(EXP : 效期 ; LOT : 批號)



正面



反面

8

試劑操作步驟 (二)

Legend

A reliable, leading and professional company
Legend, Legend and Legend are trademarks of Legend.



試劑卡

小滴管

乾燥劑


9

試劑操作步驟 (三)

Legend

A reliable, leading and professional company
Legend, Legend and Legend are trademarks of Legend.

- 若檢體由冰箱取出，應於測試前使檢體回溫至室溫！

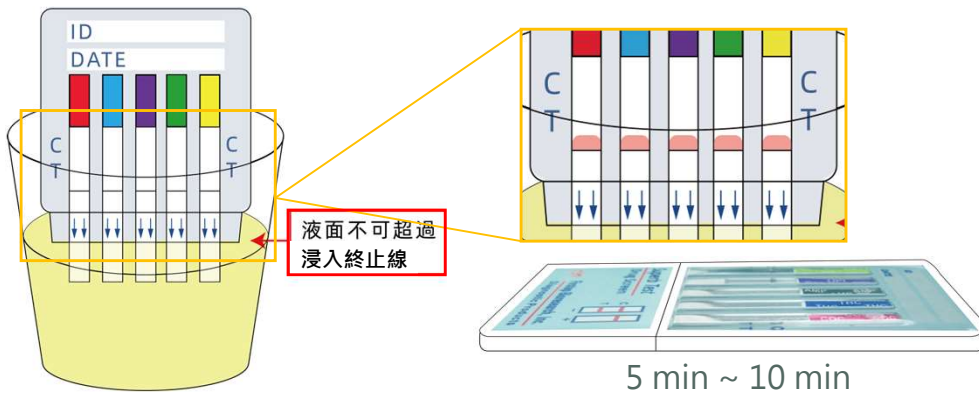

10




結果判讀

Legend

A reliable, leading and professional company
„Legend“ – marková značka společnosti Legend

靜置五分鐘後判讀結果，超過十分鐘請勿判讀。

* 每一試紙條均代表不同之毒品檢測，結果需分開判讀！

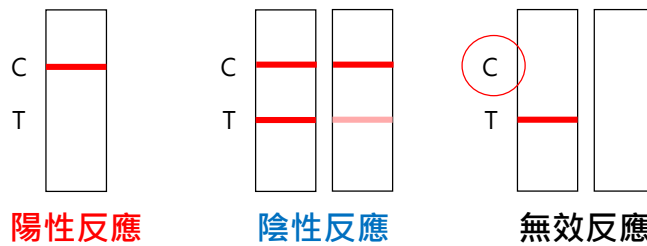

11



品質管制

Legend

A reliable, leading and professional company
„Legend“ – marková značka společnosti Legend

- C線為本試劑組內建品管指示線。
- 若測試後無C線出現，即表示檢測有誤。應重新使用新的測試匣再作測試。

12



THE END



聯準生技
04-23266366
LINE ID: 0977689806

若有需求其他組合品項，請洽聯準生技或其業務